

NICHIBAN CO.,LTD

2-3-3 SEKIGUCHI,BUNKYO-KU TOKYO112-8663,JAPAN

TEL:+81(0)3-5978-5636 FAX:+81(0)3-5978-2890



Instrucciones de Uso STEPTY™

【Descripción del Producto】

- Este producto es un vendaje que proporciona la hemostasia inmediatamente después de retirar la aguja, comprimiendo la vena. El excelente efecto hemostático lo proporciona una almohadilla de 6 mm de espesor con excelente abordabilidad sanguínea y una cinta adhesiva elástica.




【Visión general】

- Este vendaje adhesivo con almohadilla para hemostasia de presión consta de una almohadilla de 6 mm de espesor con excelente absorción de sangre y cinta adhesiva elástica. Puede ser utilizado para la hemostasia después de la extracción de sangre, transfusión o infusión usando una aguja gruesa.
- EOG esterilizado.

【Características】

<Características del área de la almohadilla>

- El espesor de la almohadilla es de 6 mm. Se logra un excelente efecto hemostático presionando firmemente con la cinta adhesiva.
- La almohadilla tiene forma elíptica y una largada de 27 mm. Cubre tanto el área de punción cutánea como la punción vascular hasta la hemostasia. Debido a que la almohadilla es ovalada, la irritación de la piel es baja.
- Se adopta la estructura en capas con varias superficies de compresión.
- La primera capa, que esta en contacto directo con la piel, consiste en un tejido no tejido de celulosa extremadamente fino que absorbe la sangre al instante. La capa del lado de la cinta está compuesta por un tejido no tejido de poliéster con propiedades repelentes al agua, lo que evita que la sangre se filtre hacia la parte posterior de la cinta.

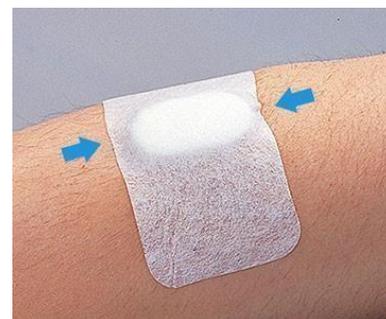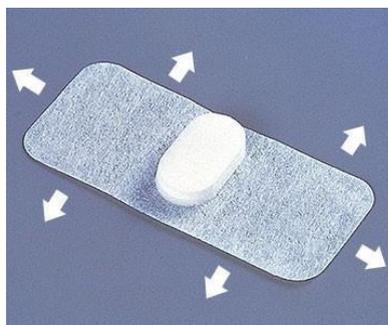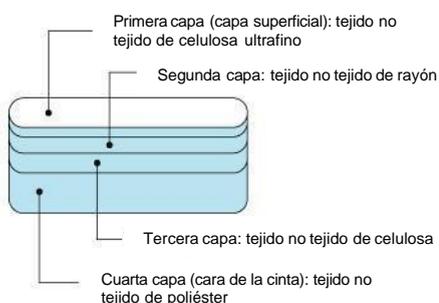


<Características del área adhesiva>


- Utiliza un tejido no tejido de uretano con gran elasticidad y flexibilidad tanto vertical como horizontal. Dado que la tasa de recuperación de elongación supera el 90%, tiene un excelente efecto en la fijación por compresión.
- Utiliza un adhesivo acrílico que es menos irritante para la piel y tiene menos probabilidades de causar erupciones.
- El adhesivo tiene alta adhesividad y se asegura bien sin deslizarse. Estirar la cinta moderadamente, aplicarla sobre la piel y fijarla de manera que envuelva.

<Características del envase>

- Cada cinta es esterilizada individualmente antes de embalar.
- El embalaje está diseñado para una fácil apertura y rápida extracción del producto.
- Desde la apertura del envase hasta la aplicación del producto, todo el procedimiento de uso es sanitario ya que se puede realizar sin tocar la almohadilla, que entra en contacto con el área de punción cutánea.

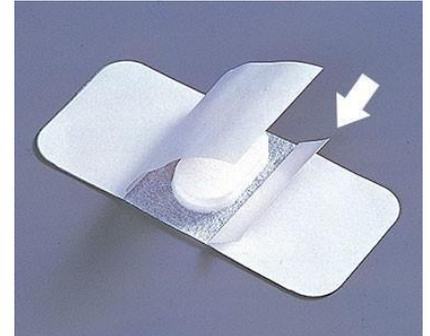

<Uso>

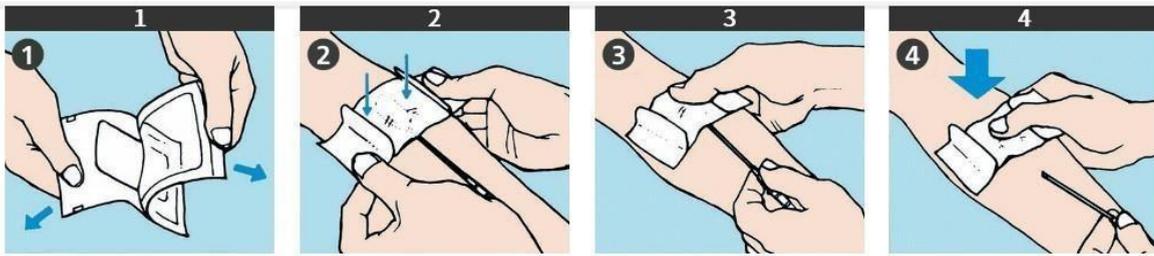

1. Tire de la flecha para abrir el paquete esterilizado y saque STEPTY. Gire el lado con la película transparente de modo que se encuentre hacia arriba, y tire del centro de la zona de eliminación de la película para una fácil apertura.

2. Inmediatamente antes de retirar la aguja o el catéter, alinee el eje largo del cojín con la vía del vaso sanguíneo, aplique el cojín de modo que la aguja o el punto de punción del catéter esté en el centro del cojín y presione ligeramente el cojín para mantenerlo en su lugar.

3. Con el dedo (pulgar) suavemente o sobre la almohadilla, saque la aguja o el catéter.

4. Mientras saca la aguja o el catéter, presione firmemente la almohadilla con su dedo (pulgar).



5. Mientras continúa aplicando presiones firmes para que la almohadilla no se deslice, estire la cinta adhesiva hasta el ancho de su pulgar y sujétela firmemente a la piel.

6. Tenga cuidado de no mover la almohadilla mientras cambia el dedo que presiona a su otro pulgar, y continúe aplicando una presión firme.

7. Mientras continúa aplicando una presión firme para que el cojín no se deslice, estire la cinta adhesiva en el lado opuesto sobre el ancho de su pulgar y fíjela firmemente a la piel.

8. Se aplica la apariencia STEPTY. El cojín se fija en su lugar envolviéndolo en cinta.

<Aplicaciones>

- Hemostasia de la vena periférica y protección tras donación de sangre, transfusión e infusión con una aguja gruesa (calibre 14-18)

【Precauciones de uso】

- Este producto está destinado a la hemostasia y la protección de las venas periféricas, y no debe ser utilizado para sitios que no sean venas periféricas (Si se utiliza para otras venas que no sean periféricas, no cumplirá con sus funciones previstas y esto puede causar la falla de hemostasia o embolia aérea.)

- Reutilización prohibida
- Si la herida se infecta clínicamente mientras se usa el producto, detenga su uso y realice un tratamiento adecuado.
- Si los síntomas parecen ser un trastorno de la piel (erupción/enrojecimiento, ampollas, descamación de la piel, picazón, etc.) en el lugar de aplicación, interrumpir el uso y timar le tratamiento adecuado.
- Asegúrese de quitar la aguja antes de aplicar este producto para evitar daños en el vaso sanguíneo y la piel.
- Estirar la cinta más allá de la longitud requerida para la compresión causará un tirón excesivo de la piel y puede causar irritación de la piel.
- Para evitar la irritación de la piel tanto como sea posible, no use este producto por más de 2 horas.
- Al retirar el producto después de su uso, compruebe que se ha detenido la hemorragia. Si la hemostasia es insuficiente, tomar las medidas adecuadas como presión manual hemostasia.
- Después de la extracción, proteger el área de punción con protección de cobertura para evitar la infección.
- Si el producto se moja o se ensucia durante su uso, quítelo y aplique una almohadilla limpia inmediatamente.
- No utilice el producto si el embalaje está sucio, dañado o mojado.
- Utilizar el producto inmediatamente después de romper el sello.
- Al quitar la almohadilla, quítela lentamente a lo largo del flujo del vello corporal para evitar daños en la piel.

【Precauciones de almacenamiento】

- Almacene a temperatura ambiente, lejos del agua, de las altas temperaturas, de la humedad alta y de la luz solar directa.

【Especificaciones】

STEPTY Blanco

Número de producto	Tamaño		Por caja
	Área de la cinta	Superficie de la almohadilla (6mm de espesor)	
No.80	39mm x 80mm	27mm x 15mm	50 unidades

STEPTY Marrón

Número de producto	Tamaño		Por caja
	Área de la cinta	Superficie de la almohadilla (6mm de espesor)	
No.80A	39mm x 80mm	27mm x 15mm	50 unidades

Overseas Business Department (HQ)

Nichiban Co., Ltd.

February.2021